



Creating balance in healthcare



Plafondtilliften



Veilig tillen / plafondtilliften

Wanneer er beperkt ruimte is, kunnen plafondtilliften een goede oplossing zijn. Sommige personen met een beperkte mobiliteit kunnen met een plafondtillift geheel zelfstandig hun tilproces uitvoeren. Dit vergroot de zelfstandigheid en het comfort en verbetert zo de levenskwaliteit aanzienlijk. Daarnaast is een plafondtillift fysiek minder belastend voor de verzorgende.

De Likorall plafondtillift heeft zich al jaren bewezen. Met zijn vriendelijke vormgeving en krachtige motor tilt de Likorall motor tot 200 kg (model 243 tot 230 kg). Hiermee komt de plafondtillift tegemoet aan de groeiende behoefte van extra tilcapaciteit in de huidige zorgomgeving. De moderne electronica beantwoordt aan de zeer hoge eisen van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Een plafondtillift is makkelijk toepasbaar in kleine ruimtes omdat deze liften geen vloeroppervlak gebruiken, niet in de weg staan en er geen opbergruimte nodig is. Er kan eenvoudig gemanoeuvreerd worden en bed of bad hoeven niet onderrijdbaar te zijn. Met behulp van een plafondtillift kan probleemloos de gehele ruimte gebruikt worden. Zo creëren we, door inzet van de juiste hulpmiddelen, samen met u 'life without limits' voor uw cliënten.

Om een comfortabel gebruik van de plafondtillift mogelijk te maken is het belangrijk om in combinatie met de plafondtillift en andere accessoires de juiste keuze te maken in tiljukken en tilbanden. Lopital biedt naast verschillende tiljukken, een uitgebreid assortiment tilbanden. Afhankelijk van de gebruiker en het doel kan er gekozen worden voor verschillende modellen, maten en materialen. De mate van ondersteuning, comfort, hygiëne en veiligheid zijn hierbij belangrijke aspecten. Natuurlijk begeleiden we u ook hierbij graag in uw keuze.





Ontdek het gemak van onze plafondtilliften.

2103121001

Likorall 200



Een veilige keuze



De Likorall 200 is een veilige keuze. De motor is voorzien van de gepatenteerde veiligheidstrommel, een elektrische nooddaalfunctie, een noodstop, een tilband met 10-voudige veiligheidsmarges en bescherming tegen beknelling.

Opties

De Likorall 200 is voorzien van de Q-link voor het snel en gemakkelijk verwisselen van tilaccessoires uit het brede scala producten van Liko. Door de vele installatieopties voor het railsysteem van Liko en de mogelijkheid vrijstaande systemen te kiezen kan de Likorall 200 in elke omgeving geïnstalleerd worden.

Veelzijdig en compleet.



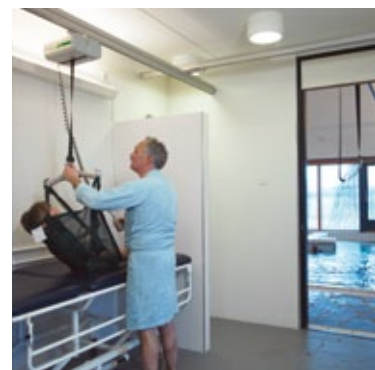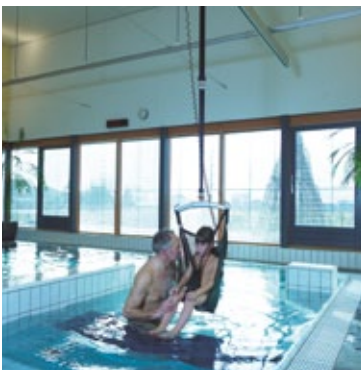

Likorall 242 / 243 / 250

De Likorall is misschien wel de meest gebruikte tilliftmotor ter wereld. Dagelijks tilt dit type motor tienduizenden mensen en ontziet een overeenkomstig aantal ruggen.

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid, de doordachte veiligheid en het doordachte ontwerp zijn Likorall tilmotoren bijzonder populair bij zowel verzorgend personeel als gebruikers.

Een combinatie van unieke technologie, bedrijfszekerheid en servicevriendelijk onderhoud, met andere woorden een uitermate doordacht inkoopbesluit.


Uniek veiligheidssysteem

- Gepatenteerde veiligheidstrommel SFS. Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Eindpositieschakelaar.
- Liftband met tienvoudige veiligheidsmarge.
- Veiligheidsclips op tiljukken.
- Mechanische nooddal functie (sommige modellen).
- Elektrische nooddal functie met batterij-backup.
- Noodstop schakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1-2.



De motor bestaat uit een zelfremmende spindel. Als de stroomtoevoer naar de motor is uitgeschakeld, stopt de spindel automatisch.


Gepatenteerde veiligheidstrommel.

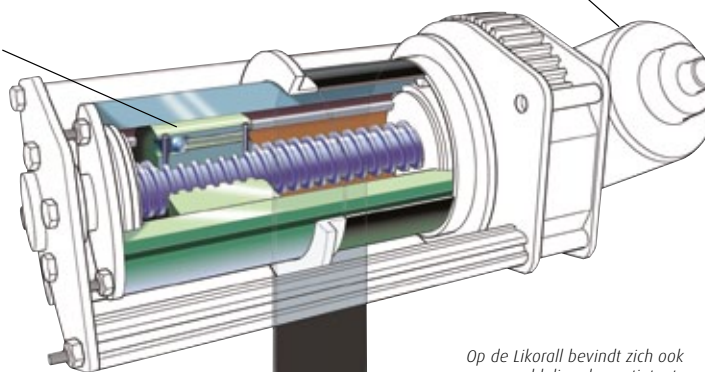

Tilstrap: heeft een tienvoudige marge op de tilsterkte.

Mechanische nooddaling voorziening. Werkt ook als er geen stroomvoorziening meer is.

Op de Likorall bevindt zich ook een nooddaling d.m.v. tiptoets indien de handbediening niet functioneert. En natuurlijk een rode noodstop voor uitschakeling van de stroomtoevoer conform CE standaard.

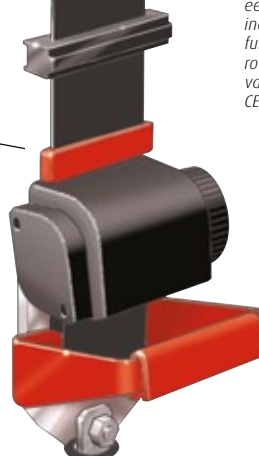



Plafondbevestiging.



Railverhoging.



Rail wissel.



Elektrische rotonde.



Elektrische railkoppeling.



400 kg capaciteit.




Octostretcher met leveler.




Loadstation aan de rail.




Quick release haak.

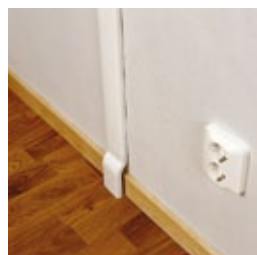

Slimline (de elegante muurbevestiging).

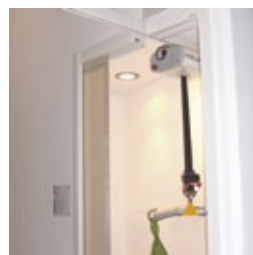

Rail doorvoer in combinatie met schuifdeur.

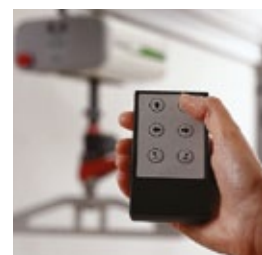

Infrarood afstandsbediening.



2103130001

Multirall 200

Multirall 200

De Multirall is veelzijdiger dan andere plafondtilliften. Liko's Quick Hook Release systeem is de sleutel tot de veelzijdigheid van deze lift. Geen gereedschap benodigd. Alle Liko tiljucken en banden kunnen gebruikt worden bij de Multirall, aansluitend op uw keuze van gebruik.

Belangrijke eigenschappen:

- Flexibele lift die op meerdere manieren kan worden gebruikt.
- Eenvoudig verplaatsbaar, zonder gebruik van gereedschap.
- Betrouwbaar, geïntegreerd veiligheidssysteem.
- Handige accessoires, wagentje, Helping Hand etc.
- Grote handgrepen aan beide zijden van de motor
- Compleet railsysteem incl. mogelijkheid als vrijstaand in combinatie met FreeSpan.
- Kan worden gebruikt met Liko's complete accessoireprogramma.

Toepassing 1: Een normale plafondtillift.

Hang de Multirall in de loopwagen aan het railsysteem, kies een tiljuk en tilband, de lift is nu klaar voor gebruik.

Toepassing 2: Een gemakkelijke draagbare plafondtillift voor incidenteel gebruik.

Plaats de motor op een transportkar, geef de tilband van de motor zoveel ruimte zodat er verbinding gemaakt kan worden met de loopwagen op de rails, de Multirall is nu klaar voor gebruik.

Toepassing 3: Kamer naar kamer lift.

Hang de Multirall op zoals toepassing 2. Met een verlengingsriem en meerdere loopwagens aan de rails in andere kamers wordt de Multirall een kamer naar kamer lift die naar iedere gewenste kamer verplaatst kan worden. Eenvoudig en veilig!

Maximale belasting: 200 kg.





Helping hand.



Transportkar.





Technische details


Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Tilcapaciteit	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Gewicht incl. batterij
2103121001	Likorall 200	Aluminium / Kunststof	200	205	87	50 mm / s	12,5

Technische details

Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Tilcapaciteit	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Gewicht incl. batterij
2103122006	LikoRall 242 ES wit	Aluminium / Kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122007	LikoRall 242 ES naturel R2R	Aluminium / Kunststof	200	205	74	50 mm / s	13,2
2103122008	LikoRall 242 ES wit R2R	Aluminium / Kunststof	200	205	74	50 mm / s	13,2
2103122010	LikoRall 242 S wit	Aluminium / Kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122012	LikoRall 242 S wit R2R	Aluminium / Kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122501	LikoRall 250 ES Naturel	Aluminium / Kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103122502	LikoRall 250 ES wit	Aluminium / Kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103123002	LikoRall 243 ES wit	Aluminium / Kunststof	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	LikoRall 250 S IRC	Aluminium / Kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6

Technische details

Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Tilcapaciteit	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Gewicht incl. batterij
2103130001	Multirall 200	Aluminium / Kunststof	200	160	74	60 mm / s	8,7

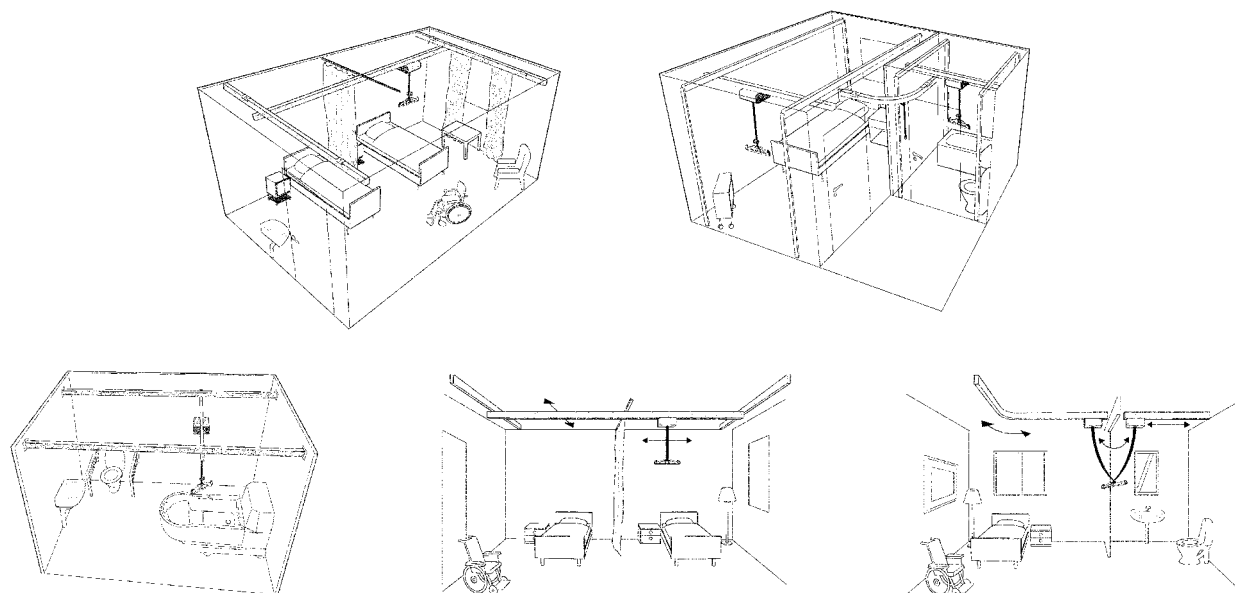

Technische specificaties

Likorall 200/242/243/250

- Tilcapaciteit: Likorall 200: 200 kg.
Likorall 242: 200 kg.
Likorall 243: 230 kg.
Likorall 250: 250 kg.
- Tilsnelheid: 5 cm/s onbelast.
- Tilbereik 200: 180 cm.
- Tilbereik 242/243/250: 210 cm.
- Motor: 24V, 10A.
- Batterijen: 2 x 12V, 2.6Ah klep gereguleerde oplaadbare loodzuur batterijen.
- Batterijlader: externe oplader. 100-240V, 40-60Hz, max 0,6A.
- Tilsnelheid: 15 cm/s.
- Graad van bescherming: IP43.
- Materiaal: geanodiseerd aluminium.
- Nooddaling: mechanisch en elektrisch.
- Interval: Int/gebr. 10/90, actief gebruik max. 6 min.
- De Likorall is geclassificeerd als een medisch technisch product, Klasse 1 in overeenstemming met MDD93/42/EEG. De Likorall voldoet aan de eisen gesteld volgens IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 en CAN/CSA C22.2 No.606.1.

Multirall 200

- Vermogen: 220 kg.
- Accu's: 2 x 12V 2,6Ah.
- Oplader: 100-240 VAC 40-60 Hz.
- Tilsnelheid: 6 cm/s of zonder belasting.
- Tilsnelheid: 160 cm.
- Elektr. gegevens: 24V, 7A.
- Afmetingen motor: 150 x 185 x 280 mm (bxhxl).
- Gewicht: 8,5 kg incl. accu (2 kg).
- Motoromkasting: ABS/PC VO.
- Nooddaling: elektrisch en mechanisch.
- Max. belasting: 200 kg.
- Dit apparaat is voor gebruik binnenshuis.
- Type B, volgens de beschermingsgraad tegen elektrische schokken.
- Klasse II uitrusting.
- IP-klasse 30.
- De band van Multirall heeft een 10-voudige veiligheidsmarge en veiligheidstroommel met valpreventie.
- Multirall is geclassificeerd als een medisch technisch product, Klasse 1. Multirall voldoet aan de eisen gesteld volgens IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535 en UL-2601-1 en CAN/CSA C22.2 No.606.1.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

